



Kangaroo Joey™

Bomba de alimentación enteral

Instrucciones de uso de la carga del set

Siga los procedimientos adecuados para llenar o insertar el envase de alimentación. Oprima el botón de Encendido/Apagado en la esquina inferior derecha para encender la bomba.



Tome la orejeta en la válvula e insértela firmemente en la cavidad izquierda. Oprima hacia abajo la orejeta para asegurar que la válvula esté bien ajustada. La orejeta debe estar alineada con la ranura en la tapa azul. La tapa azul no se podrá cerrar si la orejeta no está bien ajustada.



Tome el sujetador de anillo negro y suavemente pase el tubo alrededor del rotor e inserte el sujetador en la cavidad derecha. **NO AJUSTE EN EXCESO LOS TUBOS.**



Una vez que el set de alimentación esté cargado, cierre la tapa. Ahora la bomba está lista para funcionar normalmente.





COVIDIEN

positive results for life™

Kangaroo Joey™

Bomba de alimentación enteral

Instrucciones de uso de altura para colgar



Para lograr la precisión adecuada, la línea de líquido inicial en el envase del set de alimentación debe ubicarse a 6 pulgadas (15,2 cm.) sobre la bomba de alimentación cuando comience el ciclo de alimentación.



COVIDIEN

COVIDIEN, COVIDIEN con logotipo y las marcas con el símbolo™ son marcas comerciales de Covidien AG o su filial.

©2008 Covidien AG o su filial. Reservados todos los derechos.

H6255S 1M 0408

15 HAMPSHIRE STREET
MANSFIELD, MA
02048

1-800-962-9888
1-508-261-8000

WWW.COVIDIEN.COM