


OMRON®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Monitor de Pressão Arterial Automático com I.P.A.N. - Indicador de Pressão Alta e Normal Modelo HEM-710INT

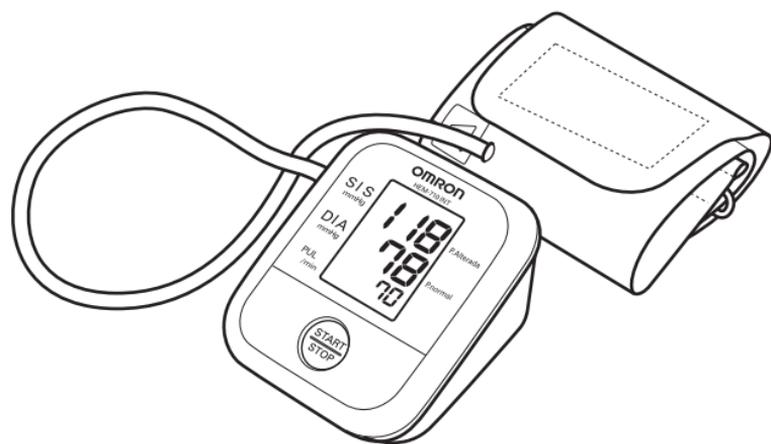

PORTUGUÊS

ÍNDICE

Antes de usar a unidade

Introdução	P3
Informações de segurança	P4
Operação do dispositivo	P4
Cuidados e manutenção	P6
Antes de medir a pressão	P7

Instruções de operação

Conheça a unidade	P8
Visor da unidade	P9
Símbolos do visor	P10
Símbolo de batimentos cardíacos	P10
Instalação das pilhas	P11
Como aplicar a braçadeira	P13
Como selecionar o modo	P16
Como realizar uma medição	P17
Condições especiais	P21

Cuidados e manutenção

Cuidados e manutenção	P22
Indicadores de erro e solução de problemas	P23
Declaração da FCC	P25
Garantia	P26
Especificações	P27

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir o Monitor de Pressão Arterial Automático Omron® HEM-710INT.

Preencha para consultas futuras.

DATA DE COMPRA: _____

NÚMERO DE SÉRIE: _____

Grampeie a nota fiscal aqui.

Seu novo monitor digital de pressão arterial usa o método oscilométrico de medição de pressão arterial. Isto significa que o monitor detecta o movimento do sangue pela artéria e converte os movimentos em uma leitura digital. O monitor simplesmente indica por meio de um código que a pressão arterial e o pulso estão normais ou alterados.

O HEM-710INT vem com os seguintes componentes:

- Monitor
- Braçadeira padrão para adultos
- Quatro pilhas alcalinas “AAA”
- Manual de Instruções impresso em português
- Guia Rápido

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Para garantir o uso correto do produto, siga sempre as medidas básicas de segurança, incluindo as advertências e cuidados incluídos neste manual de instruções.

SÍMBOLOS DE SEGURANÇA USADOS NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES	
 ADVERTÊNCIA	Indica uma situação perigosa em potencial que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
 CUIDADO	Indica uma situação perigosa em potencial que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados ao usuário ou paciente, ou pode danificar o equipamento ou outros itens.

OPERAÇÃO DO DISPOSITIVO

- ⚠ Entre em contato com o seu médico para obter informações específicas sobre a sua pressão arterial. O auto-diagnóstico e tratamento usando os resultados medidos pode ser perigoso. Siga as instruções do seu médico ou serviço de saúde licenciado.
- ⚠ Se o fluido da pilha vazar e entrar em contato com os olhos, enxágüe, imediatamente, com bastante água. Procure um médico imediatamente.
- ⚠ Este instrumento não deve ser usado em medicações invasivas.
- ⚠ Leia todas as informações do manual de instruções e em qualquer outro documento contido na embalagem antes de operar a unidade.
- ⚠ A unidade foi desenvolvida para a medição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos em adultos. Não a use em bebês ou em pessoas que não conseguem expressar sua vontade.
- ⚠ As pessoas com problemas graves de fluxo arterial ou doenças arteriais deverão consultar um médico antes de usar a unidade. O enchimento da braçadeira pode causar sangramento interno.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

OPERAÇÃO DO DISPOSITIVO (continuação)

- ⚠ Leia a seção Condições especiais (página 21) do manual de instruções se sua pressão arterial sistólica estiver acima de 220 mmHg. Encher a braçadeira para uma pressão arterial acima do necessário pode causar hematomas na área em que a braçadeira for aplicado.
- ⚠ Opere o dispositivo unicamente para o fim para o qual foi desenvolvido. Não o use para nenhum outro propósito.
- ⚠ O descarte do dispositivo, dos componentes e de acessórios opcionais deve ser feito de acordo com as regulamentações locais aplicáveis. O descarte ilegal pode causar poluição ambiental.
- ⚠ Não use telefones celulares nas proximidades do dispositivo. Isto pode causar falha operacional.
- ⚠ Não encha a braçadeira quando ele não estiver preso ao redor do braço.
- ⚠ Use apenas peças e acessórios autorizados pela Omron. Peças e acessórios não aprovados para uso com o dispositivo podem causar danos à unidade.
- ⚠ Use apenas pilhas alcalinas de 1.5V com esse dispositivo. Não use outros tipos de pilhas. Elas poderão causar danos à unidade.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- ⚠ Remova as pilhas se for guardar a unidade por três meses ou mais.
- ⚠ Não submeta o monitor a choques fortes, como deixar a unidade cair no chão.
- ⚠ Não mergulhe o dispositivo ou qualquer um de seus componentes na água.
- ⚠ Conserve o dispositivo e seus componentes em local limpo e seguro.
- ⚠ Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Omron Healthcare provocarão a anulação da garantia do usuário. Não desmonte ou tente reparar a unidade ou seus componentes.


ANTES DE MEDIR A PRESSÃO

Para assegurar uma leitura confiável, siga estas recomendações:



1. Evite comer, tomar bebidas alcoólicas, fumar, exercitar-se e tomar banho 30 minutos antes de realizar a medição. Descanse por ao menos 15 minutos antes de realizar uma medição.
2. O estresse aumenta a pressão arterial. Evite medições durante períodos de estresse.
3. As medições devem ser feitas em um local calmo.
4. Afrouxe a manga da roupa.
5. Sente-se em uma cadeira e mantenha os pés apoiados no chão. Descanse o braço sobre uma mesa de modo que a braçadeira fique na altura do coração.
6. Permaneça imóvel e não fale durante a medição.
7. Mantenha um registro das leituras de sua pressão arterial e de seus batimentos cardíacos para seu médico. Uma única medição não fornece uma indicação precisa de sua verdadeira pressão arterial. É necessário realizar e registrar várias medições ao longo de um período. Tente medir sua pressão arterial diariamente nos mesmos horários para obter coerência.
8. Aguarde 2 a 3 minutos entre as medições. O tempo de espera permite que as artérias retornem à condição anterior à medição da pressão arterial. Pode ser necessário aumentar o tempo de espera, dependendo das suas características físicas individuais.

CONHEÇA A UNIDADE


Unidade principal:

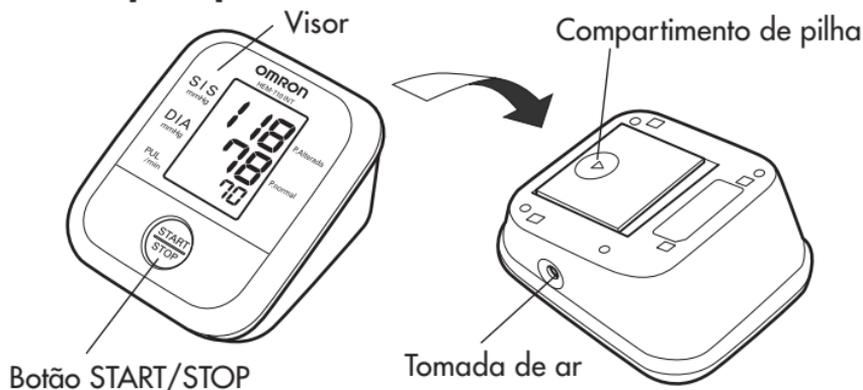

Componentes:

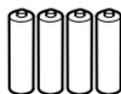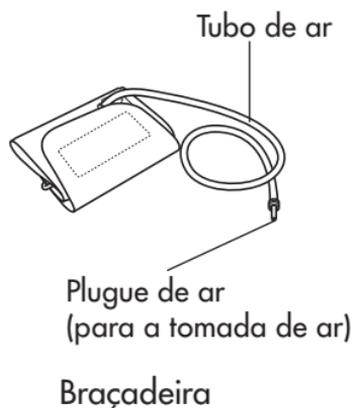

Quatro pilhas alcalinas
"AAA" (LR03)

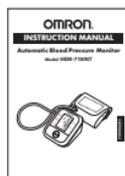


Manual de Instruções



Guia Rápido

VISOR DA UNIDADE

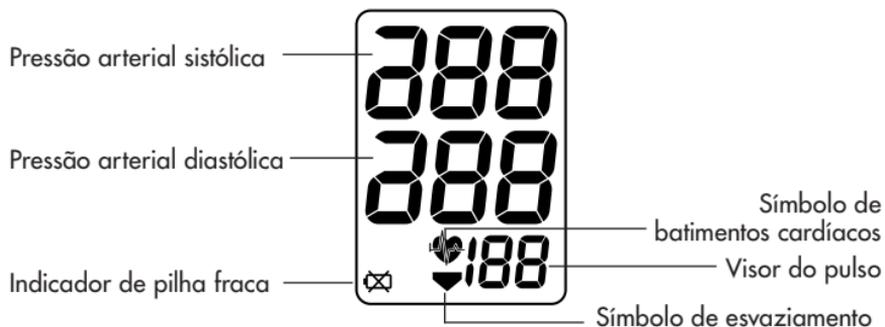

SÍMBOLOS DO VISOR

A American Heart Association (AHA) recomenda as seguintes diretrizes para o limite acima do normal em medições de pressão arterial domésticas:

Diretrizes Domésticas da AHA para Limites Acima da Pressão Arterial Normal	
Pressão arterial sistólica	135 mmHg
Pressão arterial diastólica	85 mmHg

Essas diretrizes são generalizadas, visto que a pressão arterial depende da idade e morbidade. A AHA recomenda uma meta de pressão arterial inferior para determinados pacientes, incluindo pacientes diabéticos, mulheres grávidas e pacientes com insuficiência renal¹.

O monitor não tem a finalidade de ser um dispositivo para diagnóstico.

▲ ADVERTÊNCIA

Entre em contato com o seu médico para obter informações específicas sobre a sua pressão arterial. O auto-diagnóstico e tratamento usando os resultados medidos pode ser perigoso. Siga as instruções do seu médico ou serviço de saúde licenciado.

A Omron Healthcare recomenda que você entre em contato com o seu médico se o SÍMBOLO DE BATIMENTOS CARDÍACOS aparecer no visor com os valores de medição.

SÍMBOLO DE BATIMENTOS CARDÍACOS ()

COMO REALIZAR UMA MEDIÇÃO

O Símbolo de batimentos cardíacos pisca no visor durante a medição.

O Símbolo de batimentos cardíacos pisca a cada batimento.



Quando a medição é concluída, o Símbolo de batimentos cardíacos pisca no visor com a pressão arterial e o batimento cardíaco caso a leitura esteja acima de 135 para o valor de Pressão arterial sistólica e/ou acima de 85 para o valor de Pressão arterial diastólica.

¹ Declaração Científica da American Heart Association 2004

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

1. Vire a unidade principal de cabeça para baixo.
2. Pressione o indicador ▲ na tampa das pilhas e puxe a tampa para fora na direção da seta.
3. Instale 4 pilhas “AAA” de modo que as polaridades + (positiva) e - (negativa) coincidam com as do compartimento de pilha, como indicado.
4. Recoloque a tampa das pilhas. Deslize a tampa do compartimento de pilha, conforme indicado, até que ela se encaixe.

Tampa das pilhas

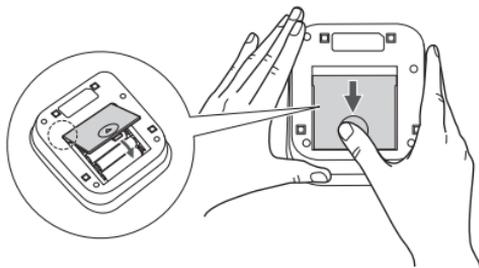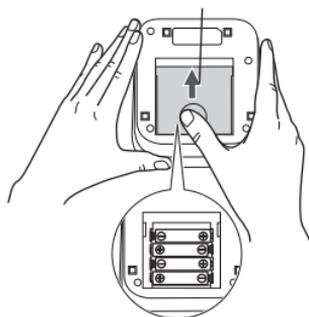

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS



Indicador de pilha fraca

Quando o Indicador de pilha fraca aparecer no visor, desligue o monitor e remova todas as pilhas. Substitua-as por quatro pilhas igualmente novas.

⚠ ADVERTÊNCIA

Se o fluido da pilha vazar e entrar em contato com os olhos, enxágüe, imediatamente, com bastante água. Procure um médico imediatamente.

OBSERVAÇÃO: As pilhas incluídas podem ter uma duração menor.

⚠ CUIDADO

O descarte do dispositivo, dos componentes e de acessórios opcionais deve ser feito de acordo com as regulamentações locais aplicáveis. O descarte ilegal pode causar poluição ambiental.

COMO APLICAR A BRAÇADEIRA

⚠ CUIDADO


Leia todas as informações do manual de instruções e em qualquer outro documento contido na embalagem antes de operar a unidade.

⚠ CUIDADO

A unidade foi desenvolvida para a medição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos em adultos. Não a use em bebês ou em pessoas que não conseguem expressar sua vontade.


COMO APLICAR A BRAÇADEIRA NO BRAÇO ESQUERDO

1. Assegure-se de que o plugue de ar esteja inserido de forma segura na unidade principal.

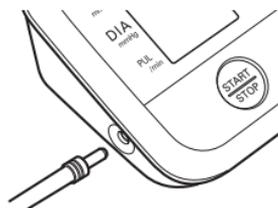


OBSERVAÇÃO: Se a braçadeira não estiver montado, coloque-o com o anel D no lado direito e o tubo saindo pela parte de baixo. Passe a ponta através do anel D fazendo uma volta. O pano macio deverá ficar dentro dessa volta.

2. Afrouxe a manga da roupa na parte superior do seu braço esquerdo.

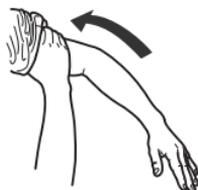


COMO APLICAR A BRAÇADEIRA

3. Sente-se em uma cadeira e mantenha os pés apoiados no chão. Posicione o braço esquerdo sobre uma mesa de modo que a braçadeira fique na altura do coração.

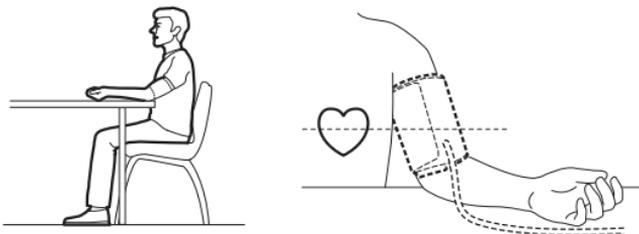

4. Coloque a braçadeira na parte superior do braço esquerdo de modo que a seta azul fique centralizada na parte interna do braço e alinhada com seu dedo médio. O tubo de ar corre ao longo da parte interna do seu braço. A parte inferior da braçadeira deve ficar cerca de 1-2 cm acima do seu cotovelo.

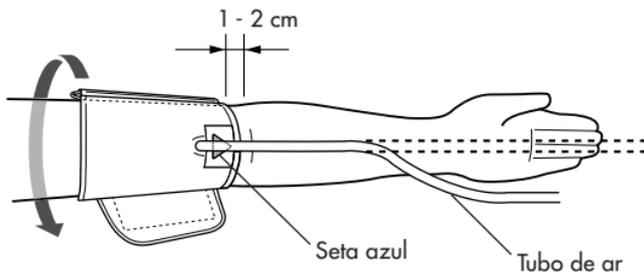

5. Prenda firmemente a braçadeira em torno do seu braço, usando o velcro.




COMO APLICAR A BRAÇADEIRA

COMO COLOCAR A BRAÇADEIRA NO BRAÇO DIREITO

Se for fazer a medição no braço direito, use as instruções a seguir para a etapa 4 na página 14.

Coloque a braçadeira na parte superior do braço direito de modo que a seta azul e o tubo de ar corram ao longo da parte interna do seu cotovelo. A parte inferior da braçadeira deve ficar cerca de 1-2 cm acima do seu cotovelo.

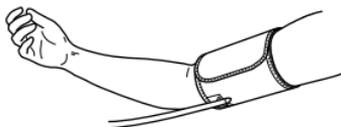

OBSERVAÇÃO: Cuidado para não deixar o braço apoiar-se sobre o tubo de ar. Isto restringirá o fluxo de ar que vai para a braçadeira.


COMO SELECIONAR O MODO

O monitor foi desenvolvido para medir a pressão arterial no MODO CHECK (controle) ou no MODO MEASUREMENT (medição). O monitor vem configurado de fábrica para medir a pressão arterial no MODO CHECK (controle).

No MODO CHECK (controle), os resultados são apresentados em código.

Caso necessário, mude para o MODO MEASUREMENT (medição) da seguinte forma:

1. Mantenha pressionado o botão START/STOP.
Todos os símbolos aparecerão no visor.
2. Ao manter o botão START/STOP pressionado por mais que 10 segundos, a imagem na tela muda.
3. Solte o botão e aparecerá “000” ou “111” na tela.

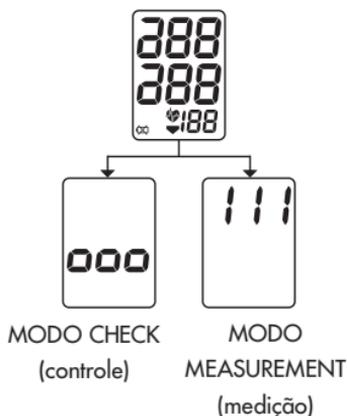

“000” (MODO CHECK (controle)): O resultado aparecerá em código.

“111” (MODO MEASUREMENT (medição)): O resultado aparecerá em valores reais.

4. Pressione o botão START/STOP para desligar.

OBSERVAÇÃO: O monitor será desligado automaticamente após 20 segundos.

COMO REALIZAR UMA MEDIÇÃO

⚠ CUIDADO

Opere o dispositivo unicamente para o fim para o qual foi desenvolvido. Não o use para nenhum outro propósito.

OBSERVAÇÃO: Em raras circunstâncias, quando um enchimento maior for necessário, o monitor encherá novamente a braçadeira de forma automática até 40 mmHg acima do enchimento inicial, e reiniciará a medição.


COMO USAR O MODO CHECK (CONTROLE)

1. Pressione o botão START/STOP.

Todos os símbolos aparecerão na tela por alguns instantes e a braçadeira começará a encher automaticamente.

Esse monitor detecta o pulso durante o enchimento.

Mantenha o braço imóvel e permaneça quieto até que todo o processo de medição se finalize.

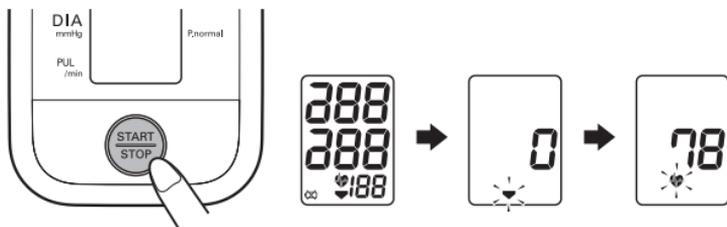

OBSERVAÇÃO: Para suspender o enchimento da braçadeira ou a medição, pressione o botão START/STOP. O monitor suspenderá o enchimento, desinflando a braçadeira, e desligará.

COMO REALIZAR UMA MEDIÇÃO

2. O enchimento será parado automaticamente e a medição será iniciada.

À medida que a braçadeira for desinflando, uma contagem decrescente aparecerá no visor.

O símbolo de batimentos cardíacos (♥) pisca a cada batimento.



3. Uma vez terminada a medição no MODO CHECK (controle), a braçadeira se desinfla. A pressão arterial e o pulso aparecerão na tela com o código “PA” ou “Pn”.

“PA” significa “PRESSAO ALTERADA”.

Isto significa que o resultado está acima de 135 para a Pressão Arterial Sistólica e/ou 85 para a Pressão Arterial Diastólica.

A Omron Healthcare recomenda que seu médico seja contatado caso “PA” apareça no visor.

“Pn” significa “PRESSÃO NORMAL”.

Isto significa que o resultado está abaixo de 135 para a Pressão Arterial Sistólica e 85 para a Pressão Arterial Diastólica. A pressão arterial muda constantemente. Continue a realizar a medição todos os dias no mesmo horário.

4. Pressione o botão START/STOP para desligar.



OBSERVAÇÕES: • Se você necessita ter os valores reais da sua pressão arterial, mude para o MODO MEASUREMENT (medição) e consulte a página seguinte.

- O monitor será desligado automaticamente após 5 minutos.


COMO REALIZAR UMA MEDIÇÃO

COMO USAR O MODO MEASUREMENT (MEDIÇÃO)

1. Pressione o botão START/STOP.

Todos os símbolos aparecerão na tela por alguns instantes e a braçadeira começará a encher automaticamente.

Esse monitor detecta o pulso durante o enchimento.

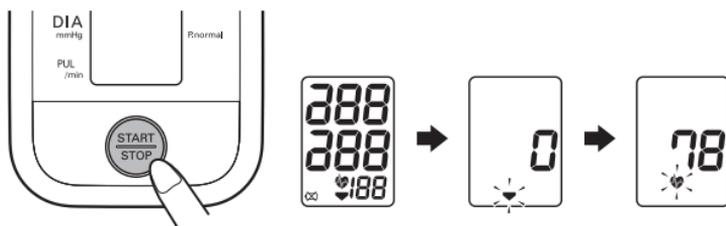

Mantenha o braço imóvel e permaneça quieto até que todo o processo de medição se finalize.

OBSERVAÇÃO: Para suspender o enchimento da braçadeira ou a medição, pressione o botão START/STOP. O monitor suspenderá o enchimento, desinflando a braçadeira, e desligará.

COMO REALIZAR UMA MEDIÇÃO

2. O enchimento será parado automaticamente e a medição será iniciada.

À medida que a braçadeira for desinflando, uma contagem decrescente aparecerá no visor.




O símbolo de batimentos cardíacos (♥) pisca a cada batimento.

3. Uma vez terminada a medição no MODO MEASUREMENT (medição), a braçadeira se desinfla. A sua pressão arterial e o seu pulso são exibidos em valores reais.

4. Pressione o botão START/STOP para desligar.

OBSERVAÇÃO: O monitor será desligado automaticamente após 5 minutos.

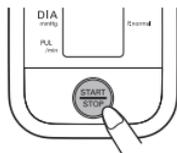

Uma vez concluída a medição, o Símbolo de batimentos cardíacos (♥) pisca no visor com a pressão arterial e o batimento cardíaco se a leitura estiver acima de 135 para a Pressão arterial sistólica e/ou 85 para o valor de Pressão arterial diastólica.



COMO MEDIR A PRESSÃO

CONDIÇÕES ESPECIAIS

⚠ CUIDADO

Encher a braçadeira para uma pressão arterial acima do necessário pode causar hematomas na área em que a braçadeira for aplicado.

Se a sua pressão sistólica normalmente for maior que 220 mmHg, mantenha pressionado o botão START/STOP até que o monitor encha 30 a 40 mmHg a mais que a pressão sistólica esperada.



- OBSERVAÇÕES:**
- Não aplique mais pressão do que o necessário.
 - O monitor não encherá acima de 299 mmHg.

Quando a medição estiver concluída, a braçadeira de braço será totalmente desinflado. A sua pressão arterial e o seu pulso são exibidos.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Para manter o seu monitor digital de pressão arterial na melhor condição possível e proteger a unidade de danos, siga as instruções a seguir:

Não force ou entorte a braçadeira de braço ou o tubo de ar. Não force a dobra.

Limpe o monitor com um pano seco e macio. Não use produtos de limpeza abrasivos ou voláteis. Não tente lavar a braçadeira.

⚠ CUIDADO

Não mergulhe o dispositivo ou qualquer um de seus componentes na água. Não submeta o monitor a extremos de calor ou frio, à umidade ou à luz solar direta.

⚠ CUIDADO

Conserve o dispositivo e seus componentes em um local limpo e seguro.

⚠ CUIDADO

Não submeta o monitor a choques fortes, como deixar a unidade cair no chão.

Remova as pilhas se for guardar a unidade por três meses ou mais. Sempre substitua todas as pilhas simultaneamente por outras novas.

Use a unidade de acordo com as instruções fornecidas neste manual. Use apenas peças e acessórios autorizados pelo fabricante.

⚠ CUIDADO

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Omron Healthcare provocarão a anulação da garantia. Não desmonte ou tente reparar a unidade ou seus componentes.

INDICADORES DE ERRO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

INDICADORES DE ERROS

SÍMBOLO	CAUSA	CORREÇÃO
	O monitor não conseguiu detectar as ondas de pulso.	Realize outra medição e permaneça imóvel até a conclusão da medição.
	O plugue de ar não está conectado.	
	Braçadeira pouco inflado. Braçadeira não está posto corretamente.	Remova a braçadeira. Leitura “Como realizar uma medição”. Realize outra medição.
		
	As pilhas estão sem carga.	Substitua as quatro pilhas. Consulte “Instalação das pilhas”.

INDICADORES DE ERRO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS E SOLUÇÕES
Não há alimentação. Nada aparece no visor da unidade.	Substitua as quatro pilhas por pilhas novas. Verifique a instalação das pilhas e o posicionamento das polaridades.
Os valores das medições aparecem muito altos ou muito baixos.	A pressão arterial varia constantemente. Muitos fatores, inclusive estresse, hora do dia e a maneira como você prende a braçadeira podem afetar a sua pressão. Releia as seções “Antes de medir a pressão” e “Como realizar uma medição”.

DECLARAÇÃO DA FCC

OBSERVAÇÃO:

INTERFERÊNCIA POTENCIAL PARA RÁDIO/TELEVISÃO (apenas para os EUA)

Este produto foi testado e definido como em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC.

Esses limites foram projetados para proporcionar proteção razoável contra interferências danosas em uma instalação residencial. O produto gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado em conformidade com as instruções, pode causar interferências danosas em comunicações de rádio. Entretanto, não há nenhuma garantia que tal interferência não ocorra em uma instalação específica. Se o produto causar interferências danosas à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o produto, o usuário deve tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes providências:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o produto e o receptor.
- Conectar o produto a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

INTERFERÊNCIA POTENCIAL PARA RÁDIO/TELEVISÃO (apenas para o Canadá)

Este aparelho digital não excede os limites da Classe B para ruídos de emissão de rádio para aparelhos digitais, conforme definido na norma de equipamentos causadores de interferência denominada “Aparelho Digital”, ICES-003 do Departamento Canadense de Comunicações.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par le ministre des communications.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o aparelho.

GARANTIA

GARANTIAS LIMITADAS (Fora dos EUA e do Canadá)

O Monitor de Pressão Arterial Automático HEM-710INT é garantido como sendo livre de defeitos de material e de mão-de-obra que venham a surgir dentro de um ano a partir da data da compra, quando usado de acordo com as instruções fornecidas com o aparelho. As garantias acima se aplicam apenas ao consumidor inicial, que adquire o produto no varejo.

Se forem necessários reparos durante o período de garantia, entre em contato com o distribuidor autorizado de seu país.

TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, PORÉM SEM SE LIMITAR A GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA FINS DETERMINADOS, SÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DA GARANTIA APLICÁVEL DESCRITA ACIMA. Alguns países não permitem limitações de duração da garantia implícita, portanto, a limitação acima pode não se aplicar a seu caso.

A OMRON HEALTHCARE NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA PERDA DE USO OU QUALQUER OUTRO CUSTO, DESPESA OU DANOS CASUAIS, DECORRENTES OU INDIRETOS. Algumas regiões não permitem a exclusão ou a limitação de danos casuais ou decorrentes, portanto, as exclusões acima podem não se aplicar a seu caso.

Esta garantia lhe dá direitos legais específicos; você pode também ter outros direitos, que podem variar de acordo com o país.

De acordo com a Portaria Inmetro nº 096/2008, é obrigatória a verificação deste instrumento uma vez ao ano por um Órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro (RBMLQ-1).

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	HEM-710INT
Visor:	Visor digital LCD
Faixa de medição:	Pressão: 0 a 299 mmHg, Pulso: 40-180/min.
Erro Maximo Admissivel:	Pressão: ± 3 mmHg Pulso: ± 5 % da leitura
Enchimento:	Automático, por bomba elétrica
Esvaziamento:	Válvula de liberação de pressão automática
Liberação rápida de ar:	Válvula de exaustão automática
Deteção da pressão:	Sensor de pressão capacitivo
Método de medição:	Método oscilométrico
Deteção de ondas de pulso:	Sensor de pressão capacitivo
Fonte de alimentação:	4 pilhas “AAA” de 1.5 V
Duração da bateria:	Aprox. 300 medições quando usado uma vez por dia por 2 minutos com 4 pilhas alcalinas novas
Temperatura de operação /Umidade:	50°F a 104°F (10°C a 40°C) /30 a 85% UR
Temperatura de armazenamento /Umidade/Pressão do ar:	-4°F a 140°F (-20°C a 60°C) /10 a 95% UR /700 - 1060 hPa
Peso da unidade principal:	Aproximadamente 315 g sem incluir pilhas
Dimensões da unidade principal:	Aprox. 103 mm (C) \times 125mm (L) \times 62 mm (A)
Tamanho da braçadeira:	Aproximadamente 146 mm (L) \times 446 mm (C) Tubo de braçadeira 600 mm (C)
Circunferência da braçadeira:	Suficiente para circunferência de braço de 220 mm a 320 mm
Conteúdo:	Unidade principal, braçadeira, manual de instruções e guia rápido Quatro pilhas alcalinas “AAA”

OBSERVAÇÃO: Estas especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Distribuído por:

Peróxidos Farmacêuticos do Brasil.

Av. das Américas, 500 – Bl. 02 – Lj. 121

Barra da Tijuca – RJ

CEP: 22640-100

Tel.: 55 21 3479-6000

Sob Autorização de:

Medstar Importação e Exportação Ltda.

03.580.620/0001-35

Av. Vereador José Diniz, 3300 Conj. 307

Campo Belo

São Paulo - SP

CEP: 04604-000

Tel.: 11 5092-3700

Fabricado por OMRON HEALTHCARE

Feito na China

© 2009 Omron Healthcare, Inc.

5328167-7A