


機型	BL-H306U	量測範圍	血壓 0-300毫米汞柱 脈搏 40-199 次/分鐘
精準度	血壓 +/- 3毫米汞柱 脈搏 +/- 5% 最大	充氣方式	自動
排氣方式	自動急速排氣法	顯示	收縮壓、舒張壓、脈搏數
記憶組數	48組	手臂套尺寸	大約接近手臂環圍23-33公分/9-13英吋
操作環境	+10°C ~ +40°C, 30-85%相對濕度	儲存環境	-20°C ~ +60°C, 10-95%相對濕度
重量	含電池約265公克	電源	4顆 "AA", 鹼性電池
電池壽命	約300次測量 (一天測量兩次)	自動斷電	一分鐘內不使用即自動斷電
附件	"AA"鹼性電池四顆, 手臂套組使用說明書, 收納袋, 外包盒		
變壓器(非標準配件)	輸入: 110V AC, 60Hz, 11W 輸出: 6V, DC, 1A, 		

產品說明(各部位名稱)

- ① 液晶顯示螢幕 ② 手臂套橡皮管 ③ 手臂套 ④ 氣嘴連接座 ⑤ 開始/停止鍵 ⑥ 記憶叫出鍵
⑦ 設定鍵 ⑧ 功能鍵 ⑨ (AA)1.5伏x4顆鹼性電池 ⑩ 變壓器連接座

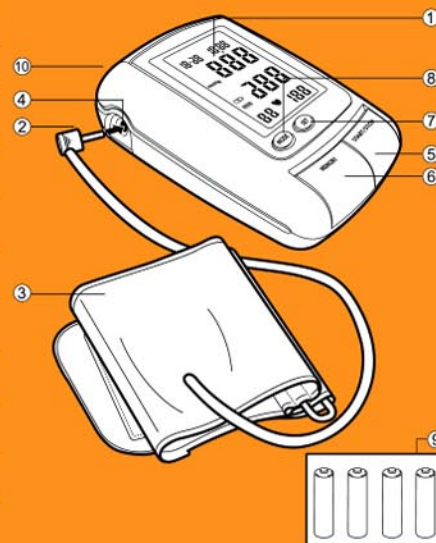

免費諮詢專線: 0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

- 故障重起因發生在機體以外者 (如: 錄影(音)帶、天線...等)
● 按裝位置之變形或搬運所引起之故障或損毀
● 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
● 因使用之過失或誤用錯誤, 以致商品故障或損毀
● 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
※ 如有下列情形之一者, 雖在保證期間內亦不予免費維修
● 本產品經後服務委託誠實公司
● 保證書內容開列日期未填寫或經塗改或與現物不符者, 則失去保證書保證效力
● 本家電產品使用於易利商業用途時, 其保證期限按保證書所載期限減半保固

※ 注意事項

- 天線、磁針、磁頭、通線管、熱感頭、印表頭、充電電池、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材料不在保證範圍內。
● 除另有契約規定外, 服務區域限中華民國管轄區域內。
※ 服務保證範圍
登錄或與公司聯絡 (以家電產品免寄回), 始享有本公司自購買日起一年之免費服務, 客戶留存聯請妥善保存, 並於本公司之工程師前往服務時主動出示本保證書以享受權益。
為維護您的權益, 應即詳實填寫購買日期並蓋店章, 於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

◎ 送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益

購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話
姓名	男	女	出生日期	年	月	日
住址	電子信箱					
電話	電話					

SAMPO

聲寶產品保證書

機號

保證書印製於說明書最後頁
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章, 以確保您的權益

SAMPO

上臂型血壓計 使用說明書

BL-H306U

User Manual

使用方法

1. 量血壓前應注意事項


- 測量血壓前休息5-10分鐘
 - 測量場所宜安靜。測量中，手臂不要動，維持輕鬆的姿勢。
 - 宜穿著輕薄或寬鬆上衣測量以利測量準確性。
 - 測量前避免運動、進食、飲酒及抽煙。
 - 測量中，室溫宜保持舒適溫度，約25°C左右。
 - 有尿意時血壓值會升高，故請於測量前將尿意排解。
 - 動脈硬化、糖尿病、肝臟病、非常嚴重之高血壓及末梢血管循環不良的病患，請依照醫生之診斷指示來配合使用本產品。
 - 高血壓會引發許多嚴重的疾病，如經醫師診斷為高血壓者，需平日測量及記錄自身血壓，做好「基礎血壓」資料是非常重要的。
- 註：一天中之血壓值會不斷的變化。
血壓值在早上較低，然後逐漸上升。
血壓值夏天較低，冬天較高。

2. 手臂套使用方法

- 以手指輕壓手臂動脈，約離左手臂內側肘3公分處。
- 找出脈搏最強處，拉住手臂套遠端穿過金屬環包住手臂，確認布套平滑面位於手臂套內側。
- 確認手臂套位置正確，魔術氈將在手臂套的外部，並且金屬環將不會碰觸你的皮膚。
- 左手臂穿過手臂套後，底部應距離肘約1.5公分，手臂套應包圍於左手臂內側動脈上。



- 拉緊手臂套使上下邊緣能緊貼左手臂。
- 當手臂套大約定位時，把魔術氈貼至包圍面。
- 以坐姿測量時，手臂套應與心臟高度相同，測量中，維持輕鬆的姿勢不要移動。
- 手臂放鬆且手掌向上。
- 確保橡皮管沒有扭絞現象。

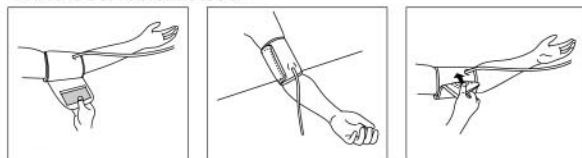

3. 主機操作

- 按「START/STOP」鍵，會顯示「全螢幕」三秒，之後會顯示目前時間，測量血壓符號「▲」會閃爍顯示於螢幕上，且血壓計會自動充氣至相當壓力後，而開始測量。
*測量中請勿移動。
- 加壓後，會慢慢洩氣，減壓符號「▼」會閃爍顯示於螢幕上。當偵測到脈搏時，脈搏「♥」型符號開始閃爍，並與心跳同步。
- 測量完成後，會顯示收縮壓及舒張壓與脈搏數，約60秒過後，主機會自動關閉，以節省電力。
- 要中止測量，請按「START/STOP」即停止測量，至時間顯示狀態。



4. 測量值之儲存、讀取及清除

測量值之儲存

每次測量完成後，所測量之收縮壓、舒張壓及脈搏數皆立即自動儲存，最大儲存資料為最新量測的48組資料，超過48組以上的舊資料則自動刪除。

測量值之讀取

- 在一般狀態下，按「MEMORY」鍵，若無儲存資料則不會顯示任何資料，有資料時則顯示最新測量值及該組資料測量完成時之時間、日期，並持續顯示一分鐘。
- 再按「MEMORY」鍵，讀取下一組資料，則會顯示第幾組資料。
- 按「START/STOP」則停止讀取資料，回至時間顯示狀態。

測量值之清除


拆下電池，再裝回電池，按「MEMORY」鍵，若無任何資料顯示，表示清除完成。



5. 時間設定

安裝電池後，顯示幕顯示所有字節亮3秒，幕顯示顯示1月1日12時00分。
設定月、日、時、分

- 按「MODE」鍵，「月」閃爍，按「SET」鍵調整月份1,2.....12。
- 再按「MODE」鍵，「日」閃爍，按「SET」鍵調整日期1,2.....31。
- 再按「MODE」鍵，「時」閃爍，按「SET」鍵調整時1,2.....12p.....12p (*12小時制)。
- 再按「MODE」鍵，「分」閃爍，按「SET」鍵調整分00,1.....59。
- 再按「MODE」鍵，回一般狀態，(顯示只顯示月日時分的狀態)。
- 當主機安裝就緒，即可啟動。

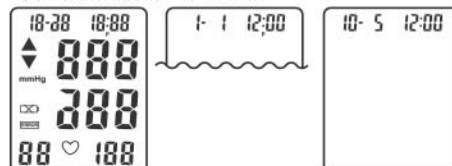

6. 如何保養/妥善保存

手臂套

- 以沾水或中性洗潔精之濕布擦拭，然後以乾布擦乾。
- 保存時避免手臂套折曲。
- 勿將手臂套任意扭曲。
- 手臂套未綁在手臂時，請勿啟動血壓計加壓。

主機

- 勿使用汽油、松香油等刺激性物品擦拭。
- 當長時間不使用時，請把電池取出，以免電池漏液造成危險。
- 避免直接放置於陽光下，高溫或潮濕多塵環境中。
- 避免存放於過低溫(低於-20°C)或過高溫(高於60°C)之場合。
- 勿分解或改造主機及手臂套。
- 勿讓主機受強烈之衝擊或掉落。

變壓器 (非標準配件)

- 長時間不使用時，請將變壓器拔離電源插座，以免變壓器發燙。
- 請依照另購變壓器之規定妥善保存。

7. 電池換裝/變壓器使用

電池安裝

打開血壓計背面電池蓋，會看見內部以(+)、(-)符號表示兩極。
放入4個「AA」型鹼性電池，並確認電池之兩極有標示之(+)、(-)位置放好。
將電池蓋裝回本體。



更換電池

當顯示幕顯示「✖」符號時，表示電力不足，請重新確認電池極性或更換4個新的「AA」鹼性電池，否則無法測量血壓。

變壓器使用

使用符合規格之變壓器，將輸出端子連接於主機後方之變壓器連接座，即可使用。

警告

- 手臂套僅適合臂圍尺寸23-33公分/9-13英寸之成年人使用，如用於小孩之手臂，測量結果會不正確。
- 如果您的手臂有任何異常或受傷將不適用此裝備。
- 若手臂套一直處於充氣狀態無法停止，請立即解開手臂套。
- 不建議使用者自行拆解組合血壓計，因為非原廠之替代品，會造成測量誤差，如有任何建議或要求服務，請諮詢就近之服務中心。
- 若使用變壓器作為電源供應，請務必使用規定之變壓器規格，以免發生危險。

8. 顯示符號說明

顯示符號	狀況/原因	處理方法
脈搏(心跳)符號	當偵測到脈搏時，脈搏(心跳)符號會閃爍。	量測中保持安靜
電力不足顯示	當電池電壓不足或電池放置的位置不正確。	更換四個新的電池或重新依電池(+)、(-)極方向插入，正確的位置。
測量錯誤符號	無法精準測量到血壓。	再按一次「START/STOP」鍵測量或者確認手臂套是否按照說明指示定位
		確認手掌是否用力
		確認量測中是否說話或移動
		確認姿勢是否正確

